



OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS  
OCUTEARS

## Istruzioni per l'uso

Soluzione oftalmica senza conservanti

### Che cos'è Ocutears® Hydro+ e a cosa serve?

Ocutears® Hydro+ è una soluzione oftalmica lubrificante, a base di ialuronato di sodio cross-linkato ad alta concentrazione (0,4%), formulato per alleviare i sintomi dell'occhio secco, in casi anche gravi, per il fastidio oculare e per la protezione della cornea.

Questo prodotto è sterile e senza conservanti.

Lo ialuronato di sodio cross-linkato dona al prodotto un'alta viscoelasticità che assicura un ottimo livello di idratazione e di permanenza sulla superficie oculare, fornendo sollievo duraturo dai sintomi dell'occhio secco, quali dolore, bruciore, pizzicore, sensazione di corpo estraneo nell'occhio, occhi stanchi e affaticati o lacrimazione.

### Ocutears® Hydro+ è indicato:

- per il sollievo di sintomi dell'occhio secco, per il fastidio oculare, nonché per la protezione della cornea come sostituto lacrimale, fornendo un'idratazione duratura;
- può essere somministrato per la lubrificazione oculare anche in caso di utilizzo di lenti a contatto.

### Ocutears® Hydro+ è utile durante e in seguito a:

- esposizione prolungata alla luce solare;
- esposizione all'aria condizionata;
- uso prolungato di schermi;
- contatto con prodotti detergenti;

Ocutears® Hydro+ può anche alleviare fastidi oculari causati da interventi chirurgici.

### Come usare Ocutears® Hydro+

Instillare 1 o 2 gocce in ciascun occhio, una o più volte al giorno o secondo il parere del medico o del farmacista.

Lavare le mani prima di aprire il flacone e prestare attenzione all'igiene durante l'utilizzo.

Flacone:

1) Prima del primo utilizzo, tirare e rimuovere completamente la fascia antimanoissione.	
2) Premere delicatamente per far cadere 1 goccia nell'occhio.	
3) Richiudere bene il flacone dopo l'uso.	

Contenitori monodose:

1) Prendere la striscia di contenitori monodose e rimuoverne uno.	
2) Aprire il contenitore girando il cappuccio.	
3) Premere delicatamente per far cadere 1 goccia nell'occhio.	
4) Smaltire correttamente il prodotto rimanente nel contenitore monodose dopo l'uso.	

Leggere attentamente il foglietto illustrativo nella sua interezza prima di cominciare ad utilizzare il prodotto.

Conservare questo foglietto illustrativo.

Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.

In caso di ulteriori dubbi, chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Se i sintomi persistono o in caso di comparsa di effetti collaterali, consultare il proprio medico.

### Avvertenze:

- Non usare il prodotto in caso di allergia o ipersensibilità ad uno qualsiasi dei suoi componenti.
- Usare il flacone entro 90 giorni dall'apertura; il contenitore monodose deve essere usato immediatamente dopo l'apertura e smaltito dopo l'uso.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata.
- Tenere lontano da fonti di calore, dalla luce solare, dall'umidità e dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Assicurarsi che la punta del contenitore non entri in contatto con l'occhio.
- Conservare il prodotto a una temperatura inferiore ai 25 °C. Non congelare.

### Composizione:

Ialuronato di sodio cross-linkato 0,4%, disodio tetraborato decaidrato, acido bórico, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili (ppi).

**Formati:** Flacone da 10 ml (PFMD), 15 contenitori monodose da 0,35 ml, 5 contenitori monodose da 0,35 ml (campione)  
Per ulteriori informazioni, consultare il proprio medico o contattare la sede locale Santen su [www.santen.eu](http://www.santen.eu)



OFFHEALTH S.p.A.,  
Via Giovanni Paisiello 10,  
50144 Firenze, Italia

### RACCOLTA DIFFERENZIATA

ASTUCCIO	FOGLIETTO	FLACONE MULTIDOSE E TAPPO	CONTENITORE MONODOSE	TAPPO MONODOSE
PAP	PAP	LDPE	HDPE	HDPE
CARTA		PLASTICA		
Verifica le disposizioni del tuo comune				
CONFERISCI IN RACCOLTA IL CONTENITORE VUOTO				

# Santen

Questo foglietto illustrativo è stato revisionato nel dicembre 2020

Data di produzione	Fabbricante	Conservare al di sotto dei 25 °C	Tenere lontano dalla luce solare	Sterilizzato con tecniche di trattamento asettico	Codice lotto	Data di scadenza	Consultare le istruzioni per l'uso	Non riutilizzare	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Mantenere asciutto



**MARVACO OY**  
PELTOTIE 20,  
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND  
repro@marvaco.fi  
**marvaco.fi • marvaco.se**

15.03.2021

Proof No. 6

# Santen

Part No: 4148-01

**Leaflet Ocutteras Hydro+**

Item No: 017488, 017515, 017495

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:  
Helvetica Neue 7-16 pt  
Myriad Pro 5-6 pt

Country: IT

Component code:  
017541

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.